


Comment monter la collerette Propal ?

Voir la vidéo de Montage de la Collerette Propal sur notre site web dans la fiche article du produit

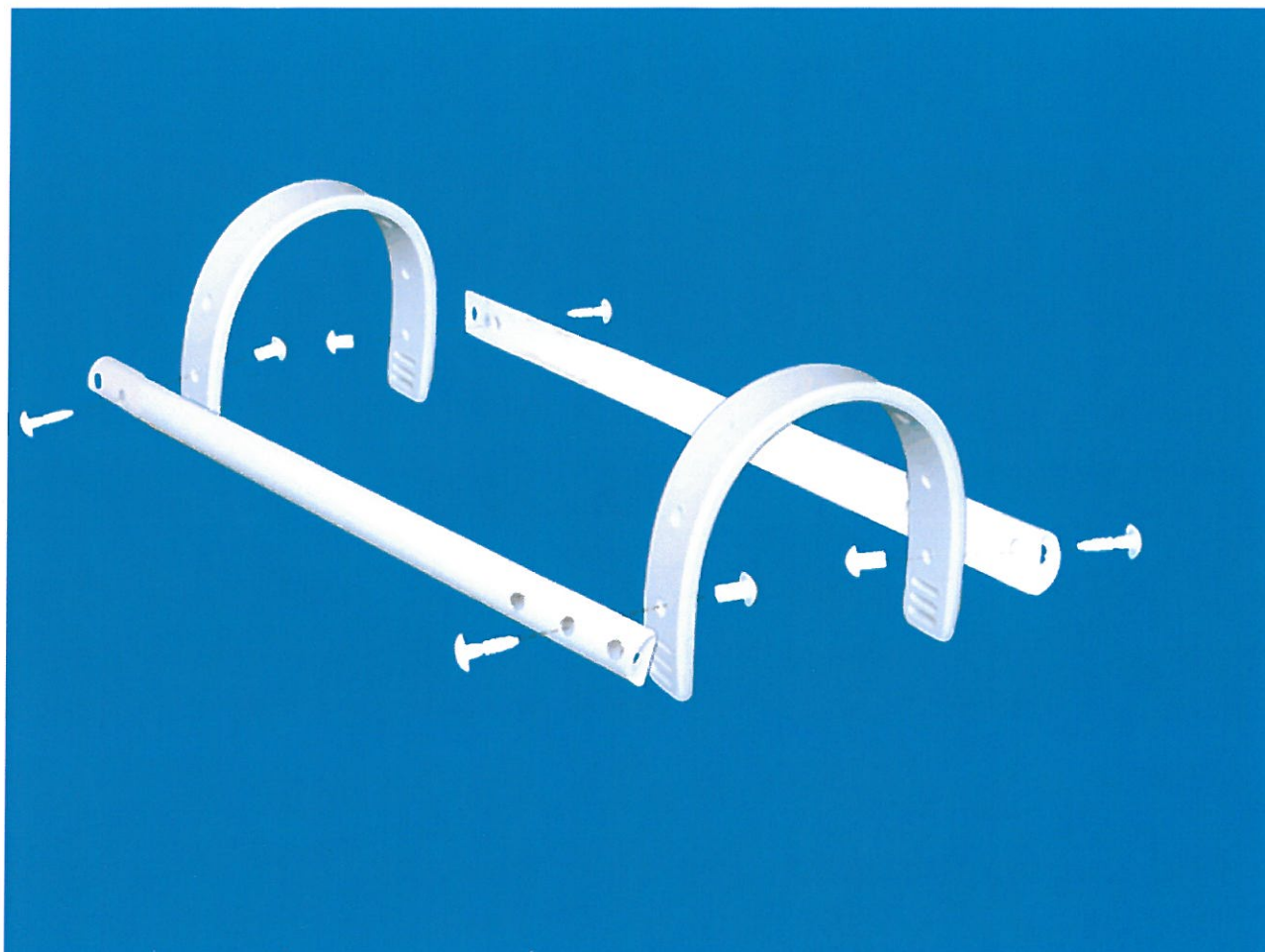

Les sellettes assurent de façon anatomique la liaison entre l'appareil et l'animal.

Elles ont une forme adaptée et peuvent être facilement déformées pour s'adapter à la corpulence de l'animal.

Le matériau plastique constitutif des sellettes est thermoformable:

Il suffit de tremper les sellettes dans l'eau chaude pour les déformer.



Les raidisseurs constituent l'armature rigide du PROPAL.

www.morinfrance.com

Ils assurent la liaison entre la sellette avant et la sellette arrière.


La longueur des raidisseurs détermine le choix de la taille de PROPAL.

Les trous situés sur les raidisseurs permettent d'affiner le réglage de l'appareil pour assurer le confort maximal de l'animal.



Les clips assurent la fixation des raidisseurs sur les sellettes.

Ces clips une fois fermés ne peuvent plus s'ouvrir.

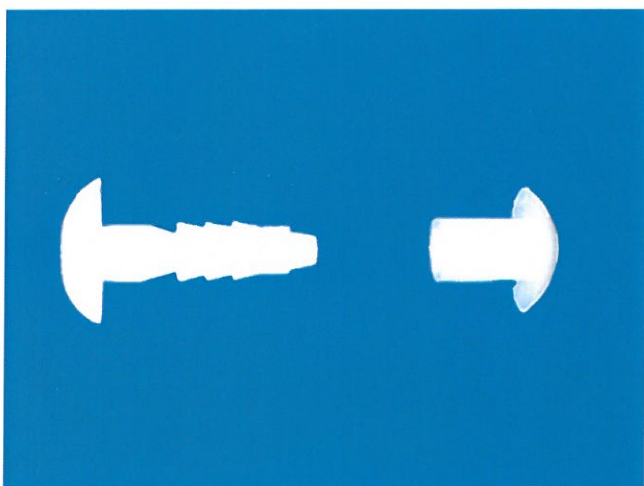


Les sangles sont en matière synthétique et assurent la fixation du PROPAL sur l'animal.

En fin d'usage le PROPAL s'enlève de l'animal par démontage des sangles.



1 Choisir la taille avec la règle PROPAL
CHOOSE THE SIZE WITH THE SIZE GUIDE

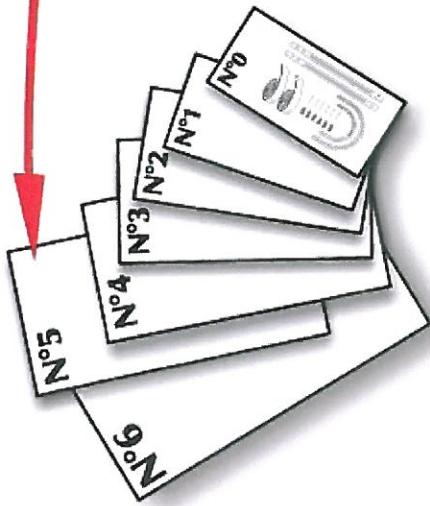

2 Chauffer les arceaux et les clips femelles
HEAT THE ARCHES AND THE HOLLOW PART OF CLIP SYSTEM

eau chaude
hot water




ou
or

micro-onde
micro-waves




3 Mettre en forme les arceaux et les sangler
FIT THE ARCHES AND FIX THEM WITH THE STRAPS

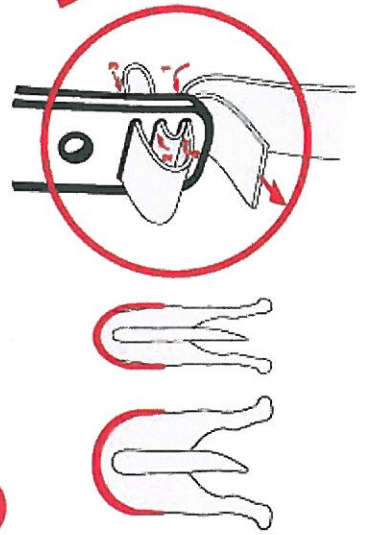

4


Fixer les raidisseurs aux arceaux avec les clips
Presser à fond les clips pour ajuster parfaitement les
raidisseurs aux arceaux
ATTACH RODS TO ARCHES WITH THE CLIPS
AS RODS AND ARCHES HAVE TO BE ADJUSTED PUSH HARD THE
HOLLOW PART IN THE PERMALE PART OF THE CLIP

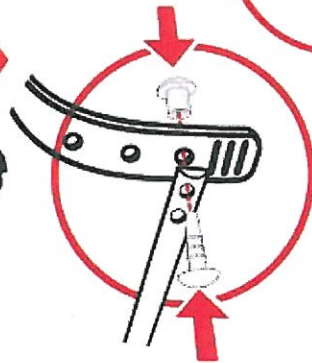

VERIFICATIONS CHECKS

Les raidisseurs ne doivent pas frotter contre
l'animal lorsque celui-ci se tient droit.
The rods must not rub against the animal
when facing forwards

L'appareil ne doit pas être réglé trop long, il
doit être mobile d'avant en arrière et laisser
le bassin et la tête libres de tous mouvements.
The apparatus should not be adjusted too long,
it should be able to move one or two inches along
the animal's back to ensure that the hips and head
can move freely.

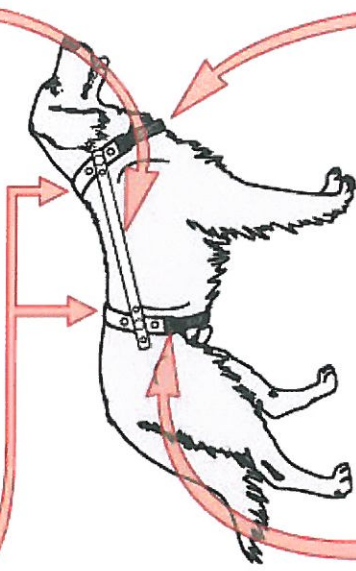

La sangle abdominale ne doit pas serrer l'animal.
Chez le mâle, la sangle passe devant le fourreau.
The rear strap must not be too tight.
For the male, the strap is located in front of the sex.

La sangle avant doit être suffisamment serrée
afin que l'animal ne puisse pas sortir la tête
de l'appareil.

The front strap should be just tight enough to prevent
the animal freeing his head from the apparatus.

Découper les 3 bandes ci-dessous puis coller la partie grise comme l'indique le schéma suivant.



Schéma pour le collage des bandes



Questions / Réponses

- **Le PROPAL Peut-il être utilisé sur les chats ?**

Les chats tolèrent le PROPAL aussi bien que les chiens. Pendant les quelques minutes qui suivent la pose de l'appareil on peut observer les quelques réactions suivantes :

- le chat recule comme s'il voulait sortir la tête de l'appareil.
- il peut se laisser tomber sur le côté et passer la patte par-dessus un des raidisseurs.

Passé ces quelques minutes l'animal découvre qu'il peut toujours se déplacer normalement et très rapidement le chat reprend sa vie sans montrer aucune gêne.

Conseils :

- lorsque l'on pose l'arceau avant il faut veiller à ce que le chat ne puisse pas passer la tête à travers.
- après la pose du PROPAL il faut mettre le chat dans sa valise de transport la tête tournée vers la porte de telle manière qu'arrivé chez lui il n'aie pas besoin de se tourner pour sortir. - l'arceau arrière ne doit pas être trop serré car en se couchant, le ventre du chat a tendance à se dilater et la sangle arrière peut devenir inconfortable pour l'animal.

- **Les extrémités des baguettes peuvent-elles blesser l'animal ?**

Les baguettes ou raidisseurs doivent être fixées aux sellettes de telle manière à ce qu'aucune zone de friction n'apparaissent entre l'animal et le PROPAL.

- les raidisseurs sont posés sur les arceaux et sont donc séparé du corps de l'animal par l'épaisseur des arceaux.
- l'animal ne rentre en contact avec les extrémités des raidisseurs que lorsqu'il cherche à se retourner, les extrémités des raidisseurs servent donc d'avertisseur à l'animal et l'informent des limites de ses mouvements. Conseils :
- Il faut respecter l'ordre de montage de l'appareil et poser le PROPAL sur l'animal debout, ou couché sur le côté. - lorsque l'on fixe les raidisseurs sur les arceaux il faut veiller à ne pas créer de zone de frottement avec l'animal et utiliser toutes les possibilités de réglage de l'appareil.
- le réglage de la longueur du PROPAL se fait en utilisant les trous sur les raidisseurs.
- on cherchera à utiliser d'abord les trous situés sur l'extrémité arrière des raidisseurs puis si cela ne suffit pas on utilisera le deuxième trou présent sur la partie avant du raidisseur. I

Il est en effet plus facile de faire dépasser le raidisseur vers l'arrière de l'animal que de le faire dépasser vers l'avant.

- **Le PROPAL empêche-t-il le grattage avec les pattes arrières ?**

En neutralisant la flexion de l'axe vertébral le PROPAL empêche les pattes arrières d'atteindre le corps. Le PROPAL est le seul appareil capable de neutraliser le grattage par les pattes arrières.

- **Peut-on utiliser le PROPAL pour protéger des plaies abdominales ?**

Le PROPAL n'a pas besoin d'être serré sur l'animal. Lorsque les arceaux épousent correctement la forme du cou ainsi que la forme du dos, l'appareil tient tout seul.

Les sangles maintiennent le PROPAL en place mais n'ont pas besoin d'être serrées. Les sangles peuvent donc se superposer à une plaie chirurgicale sans la froter.

La surface lisse du plastique n'a pas d'effet abrasif et peut être désinfectée en même temps que la plaie. L'utilisation du PROPAL permet à tout moment de surveiller l'évolution de la plaie.

- **Peut-on utiliser un PROPAL sur une plaie du cou ?**

Pour les mêmes raisons que précédemment le PROPAL peut protéger une plaie sur le cou.

Il suffit pour cela de poser normalement le PROPAL la première heure puis de desserrer ensuite l'arceau qui passe sur la plaie.

Les formes arrondies des tranches d'arceaux n'irritent pas la plaie.

- **Les raidisseurs peuvent-ils se détacher ?**

Pour fixer les raidisseurs sur les sellettes, les clips sont constitués d'une partie mâle et d'une partie femelle.

La fermeture de ces clips n'est efficace que lorsque la partie mâle est complètement enfoncée dans la partie femelle.

Il existe trois crans de fixation possible et ces trois crans doivent être complètement emboîtés pour que le clip joue entièrement son rôle. Une fois le clip fixé, il ne peut plus s'enlever en utilisation normale.